



# Nasaline – Das Nasenspülsystem



# Nasaline – Nasenspülsystem

## Nasaline – Nasenspülsystem

Hilft gegen Verstopfung der Nase bei Allergien, Erkältungen, Grippe so wie bei Infektionen der Nasennebenhöhlen. Empfohlen nach Operationen der Nase oder der Nasennebenhöhlen und zur Vorbeugung von Infektionen der Atemwege.

- Allergien
- Erkältungen
- Grippe
- Infektionen der Nasennebenhöhlen

Ohne Medikamente!

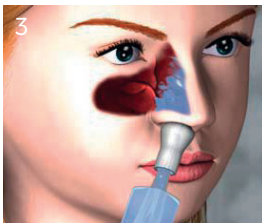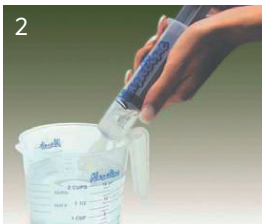

Lösen Sie einen halben Teelöffel (2,5g) Salz in einem  $\frac{1}{4}$  Liter körperwarmen Wasser auf.

Füllen Sie die Spritze mit dem Salzwasser.

Spülen Sie die Nase langsam mit dem körperwarmen Salzwasser.

Schneuzen Sie das überflüssige Salzwasser aus.



## Was ist Nasaline?

Mit **Nasaline** kann die Nase auf einfache, bequeme und sichere Weise mit einer Salzwasserlösung gespült werden. Dieses Spülen mit Salzwasser ist eine bewährte Methode, die weltweit von Ärzten empfohlen wird.

## Warum soll man Nasaline benutzen?


- Das Spülen entfernt Pollen, überflüssigen Schleim, Schorfbildungen, Staub- und Russpartikel und kann als Ergänzung zu einer medikamentösen Behandlung benutzt werden.
- Es vermindert Beschwerden u.a bei Erkältungen, allergischen Schleimhautreaktionen im Nasenbereich, Nasenverstopfung nach Aufenthalt in trockener, staubiger oder rauchiger Umgebung. Das Reizen in der Nase wird vermindert, und die Schleimhäute werden neu befeuchtet.
- Nasaline kann zur Spülung der Nase wiederholt benutzt werden.
- Auf Empfehlung des Arztes kann Nasaline nach Operationen der Nase oder Nasennebenhöhlen angewendet werden.

### Bestellinformationen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Pharmacode	Verpackung
76-601	Nasaline Nasenspüler Set Erwachsene inkl. Nasenolive und 10 Beutel Spülsalz	7394344	
76-602	Nasaline Nasenspüler Set Kinder inkl. Nasenolive und 10 Beutel Spülsalz	7394350	
76-603	Nasaline Nasenspül Salz	7394367	50 / P
76-606	Nasaline Nasenspüler Set Erwachsene inkl. Nasenolive und 10 Beutel Spülsalz		6 / P
76-612	Nasaline Nasenspüler Set Erwachsene inkl. Nasenolive und 10 Beutel Spülsalz		12 / P
76-606-K	Nasaline Nasenspüler Set <b>Kinder</b> inkl. Nasenolive und 10 Beutel Spülsal		6 / P
76-612-K	Nasaline Nasenspüler Set <b>Kinder</b> inkl. Nasenolive und 10 Beutel Spülsal		12 / P



novimed

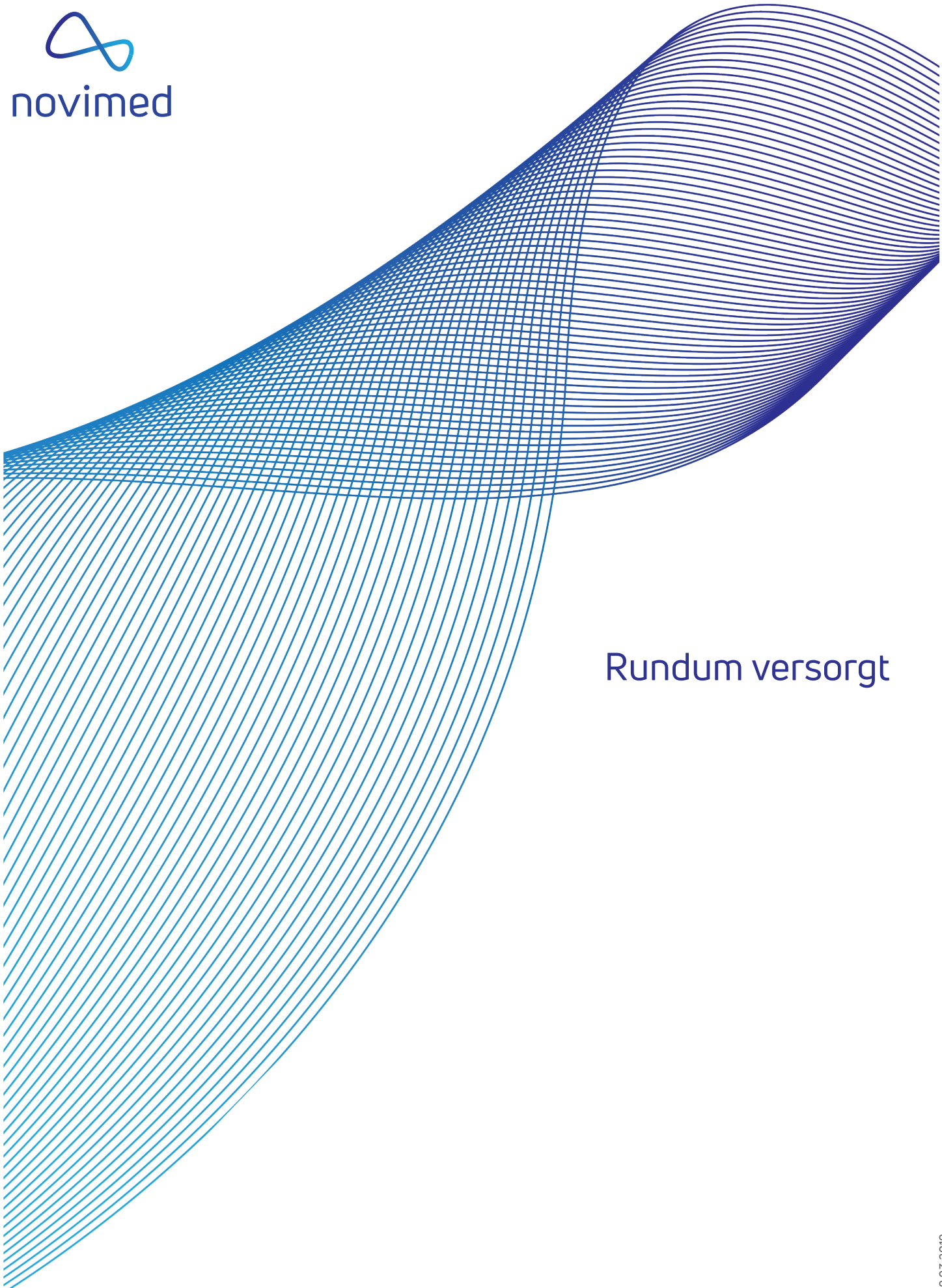

Rundum versorgt

28.03.2018