



# Nozivent Schlafen ohne Schnarchen

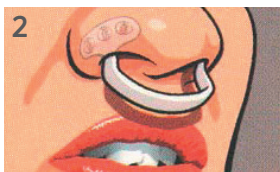

  
novimed

## Leichter atmen – erholt und frisch aufwachen

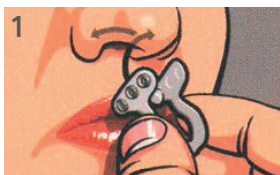

### Nozovent

Schnarchen stört nicht nur den Schlaf des Partners, es beeinträchtigt auch die Schlafqualität, das Wohlfühl und die Gesundheit.

Nozovent dehnt den schmalsten Teil des weichen Nasenkanals und erleichtert die Nasenatmung.

**Schritt 1:** Klemmen Sie die Flügel zwischen Zeigefinger und Daumen zusammen. Führen Sie einen Flügel in jedes Nasenloch ein.

**Schritt 2:** Ziehen Sie vorsichtig am Zwischen(verbindungs)stück, welches ausserhalb der Nase liegt, um den sicheren Halt von Nozovent zu überprüfen.

Artikel Nr.	Grösse	Verpackung
53-201	M	2/P
53-200	M	2/6P
53-212	M	2/12P
53-203	L	2/P
53-202	L	2/6P
26-QN-1	S	2/P
26-QN-1-06	S	2/6P